

Informationsblatt zur Einsendung von Material zur zytologischen Untersuchung

Klinische Angaben:

- Art des eingesandten Materials einschl. Angabe zur Entnahmelokalisation und Entnahmeart , wie z.B. Abstrich, Punktat, Bürstenabstrich etc.
- Klinische Diagnose / Verdachtsdiagnose sowie wesentliche klinische Befunde
- Angaben zu erfolgter Therapie, insbesondere Strahlen- oder Chemotherapie

Versand / Fixation:

Unfixiertes Material

- möglichst umgehend übersenden bzw. überbringen
- falls dies nicht möglich ist - Lagerung bei 4 ° C

Ausstrichpräparate:

- möglichst umgehend in 96 % Alkohol fixieren und in der Fixierlösung übersenden
- alternativ: Fixation mit Fixierspray, 20 Min. trocknen lassen und dann übersenden
- **Blut- und Knochenmarkausstriche:** 24 Std. lufttrocknen und dann übersenden, **nicht** mit Fixierspray bearbeiten

Wichtig: Verwendung bruchsfester Versandgefäße

Verwendung von CytoRich Red™:

- Fixiermittel auf Alkoholbasis, Lagerung bei Zimmertemperatur (15 -25 ° C)
- Proben sind 30 Tage lang stabil
- **Nur** zur Fixierung **extra-genitaler**, zytologischer Präparate geeignet
- Verwendung z. B. für Sputum, Bronchiallavagematerial, Bürstenzytologie, Gelenkflüssigkeiten, Feinnadelaspirate, Urin (**nicht** zum Nachweis einer **Hämaturie** geeignet !)
- Eine zusätzliche Fixierung ist nicht erforderlich.
- Vorgefüllte Probenröhrchen können über unser Institut bezogen werden

Erstelldatum	Revision	Datum Änderung	Titel	Seite
20.02.2009	0.1	27.09.2010	FO - 2.2 - 190c InfoZyto	Seite 1 von 2

- Verwendung im Verhältnis 1 (Probe) : 5 (Cyto Rich Red™)

Vorgehen:

- **Feinnadelaspirate:** Material unmittelbar in CytoRich Red™ Lsg. geben
- **Ascites / Pleurapunktat:** Übersendung einer genügend großen Menge (bis 1 l)
ohne vorherige Sedimentation, ggf. gesamte Punktatmenge übersenden
- **Bürstenzytologie:** Ausspülen oder Übersenden des Bürstenkopfes in CytoRich Red™ Lsg.
- **Bronchiallavage:** Einbringen des Nativmaterials in CytoRich Red™ Lsg.
- **Mamillensekret:** Aufbringen auf einen Objektträger und sofortige Fixierung
- **Spontanurin:** möglichst nativ übersenden, ggf. mit CytoRich Red™ Lsg. versetzen
- **Nierenbecken-/Harnblasen-Spülurin:**
 - Aktive Spülung mit NaCl 0,9 %
 - erste Spülung:verwerfen, enthält Detritus, Bakterien und desquamierte Zellen
 - Übersenden der zweiten Spülung in CytoRich Red™ Lsg
- **Liquor:** zum Nachweis von Tumorzellen, möglichst umgehend übersenden

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter Tel.: (0208) 881-3150 gerne zur Verfügung.

Anforderung von Versandmaterial (befüllte Röhrchen mit CytoRich Red™ Lsg./

Begleitscheine etc.) unter

Tel.: (0208) 881-3150 Fax: (0208) 881-3155 email: pathologie@eko.de

[siehe auch Internet >www.eko.de< / Intranet: Formularvorlagen]

Erstelldatum	Revision	Datum Änderung	Titel	Seite
20.02.2009	0.1	27.09.2010	FO - 2.2 - 190c InfoZyto	Seite 2 von 2